


Pre~Seed®

Dopochwowy żel nawilżający dla par starających się o dziecko

- Zapewnia optymalne środowisko dla plemników
- Nie szkodzi plemnikom ani zarodkom
- Przebadany klinicznie i zalecany przez lekarzy
- Dostosowuje wartość pH do płodnego śluzu szyjki macicy

Instrukcja użycia Pre~Seed® z jednorazowymi aplikatorami:

1. Przed pierwszym użyciem usunąć zamknięcie z tubki.
2. Pre~Seed® należy zastosować do 15 minut przed stosunkiem płciowym. Zastosowanie żelu przed rozpoczęciem stosunku umożliwi rozproszenie się wilgoci w całej pochwie i umożliwi parze większą spontaniczność.
3. Podłączyć aplikator do tubki Pre~Seed® poprzez mocne przykręcenie końcówki aplikatora do tubki (*patrz rysunek*).

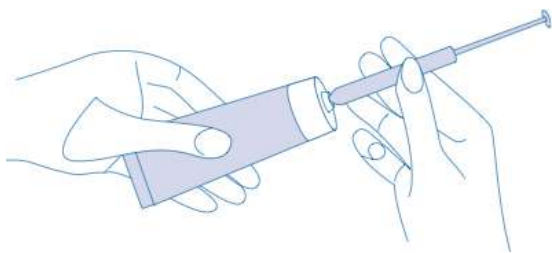

4. Delikatnie wycisnąć Pre~Seed® do aplikatora i kontynuować wyciskanie do chwili, aż aplikator będzie pełny lub znajdzie się w nim pożądana ilość żelu. Większość kobiet wybierze linię napełnienia 3 gm, aby ilość produktu w aplikatorze zaspokoiła ich wymagania. Odłączyć aplikator od tubki. Należy trzymać otwarty koniec aplikatora w pozycji pionowej – ku górze, aby nie doszło do utraty produktu. **Po każdym użyciu zakręcić tubkę i zwinąć ją od strony zgrzewu.** Nie pozostawiać żelu Pre~Seed® bez zamknięcia między zastosowaniami.
5. **Nie przechowywać żelu Pre~Seed® w aplikatorze przez czas dłuższy niż 30 minut przed użyciem.** Oznacza to, że po nabraniu produktu do aplikatora i niewprowadzeniu go do pochwy w ciągu następujących 30 minut, nieużyty produkt Pre~Seed® należy wyrzucić wraz z aplikatorem.
6. W celu wprowadzenia żelu Pre~Seed® delikatnie wprowadzić aplikator głęboko do pochwy. Można to zrobić w pozycji stojącej, leżącej lub siedzącej (na przykład na toalecie).
7. Trzymając za cylinder aplikatora powoli nacisnąć tłok do oporów celu wprowadzenia żelu nawilżającego do pochwy (*patrz rysunek*).



8. Wyjąć obie części aplikatora z pochwy.
9. W celu uzyskania właściwego nawilżenia pochwy*, po podaniu produktu należy lekko przeć. Spowoduje to wydalenie nadmiaru żelu Pre~Seed® z pochwy. W razie potrzeby można usunąć jednorazową chusteczką nadmiar produktu znajdującego się na sromie.
10. Po użyciu wyrzucić aplikator. **NIE UŻYWAĆ PONOWNIE APLIKATORÓW.**

* *Jeżeli taka metoda aplikacji nie zapewnia wystarczającego nawilżenia, sugerujemy podanie produktu Pre-Seed do pochwy (w sposób pokazany na rysunku) w pozycji leżącej, BEZPOŚREDNIO przed stosunkiem. Możliwe jest również wyciśnięcie niewielkiej ilości produktu Pre-Seed z tubki na czubki palców i naniesienie bezpośrednio na zewnętrzne narządy płciowe.*

Jeżeli taka metoda aplikacji zapewnia zbyt duże nawilżenie, należy zastosować produkt wcześniej przed stosunkiem (np. do godziny) lub użyć mniejszej ilości produktu. Należy także pamiętać, aby przeć w celu wydalania nadmiaru żelu Pre-Seed po aplikacji oraz wytrzeć jego nadmiar z okolic sromu.

Wskazówki dotyczące zewnętrznego zastosowania żelu Pre~Seed®:

Wycisnąć niewielką ilość produktu (wielkości pięcio-złotówki lub łyżeczki do herbaty) na czubki palców i nanieść w okolice narządów płciowych. W razie potrzeby zmienić ilość w celu osiągnięcia pożądanego nawilżenia. Łagodne składniki produktu Pre-Seed wymagają zastosowania nieco większej ilości żelu, niż w przypadku innych produktów, aby zapewnić właściwy i długotrwały efekt nawilżenia.

OSTRZEŻENIA

- Pre-Seed nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Nie ma właściwości plemnikobójczych ani nie zakłóca działania plemników.
- Pre-Seed jest produktem bardzo śliskim. Należy usunąć wszelkie jego wycieki, niezwłocznie po ich zauważeniu.
- Jeżeli stosowanie żelu Pre-Seed powoduje podrażnienie lub dyskomfort, należy zaprzestać używania produktu. Jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Nie stosować produktu w przypadku występowania czynnego zakażenia lub urazu pochwy.** Jeśli pacjentka była niedawno poddana operacji, przed użyciem żelu powinna zasięgnąć porady lekarza.
-

Składniki:

Woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza, Pluronic, sodu chlorek, sodu fosforan, karbomer, metyloparaben, sodu wodorotlenek, arabinogalaktan, potasu fosforan, propyloparaben.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5° - 30°C

Wartość pH: 7,0 – 7,4

Osmolalność: 260 mOsm/kg - 370 mOsm/kg

(stężenie jonów)

Więcej informacji:

Hexanova Sp. z o.o.
Pieńków 11
05-152 Czosnów
Polska
www.hexanova.pl

Data zatwierdzenia ulotki: XX.YY.ZZZZ